

# Dispogel®

Urethral Lubricant Gel  
%2 Lidocaine HCL içeren Üretral Kaydırıcı Jel  
12.5g & 8.5g

**Dispogel®** tek elle uygulaması kolay olan, 8.5g ve 12.5g steril akordiyon şişelerde, suda çözülebilir, renksiz, berrak, intrauretral yoldan uygulanan bir kayganlaştırıcı jeldir. **Dispogel®** doku uyumlu tıbbi enstrümanlarla ideal birliktelik oluşturup katater ve üretra mukozasının arasındaki sürtünmeyi azaltır, üretra duvarının travmize olma riskini minimale indirir ve mesaneye kadar kataterin uygulanmasını kolaylaştırır. Uygun kullanım için kadınlarda 8.5g ve erkeklerde 12.5g akordiyon şişeler içerisindeki kaydırıcı jeller yeterlidir.

**Dispogel®** kadın ve erkeklerde amacına uygun uygulanırken, enfeksiyon alma riskini azaltmak için antiseptik %0.05 Klorheksidin Dihidroklorür, ağrıları önlemek için de lokal anestezi %2 Lidokain Hidroklorid içerir.

**Dispogel®** uygulandıktan sonra anestezi madde olan Lidokain Hidroklorid 2'nin etkisini göstermesi için 5-10 dakika bekletilmeli ve daha sonra katater veya diğer medikal enstrümanlar üretraya uygulanmalıdır. İçeriği antiseptik Klorheksidin Dihidroklorür çok sayıda gram-pozitif ile gram-negatif bakterilere karşı etkilidir. Şırıngalar tek kullanım içindir, tam içeriği kullanılmazsa akordiyon şişe ve kalan jel atılmalıdır.

**Dispogel®** Sınıf III Tıbbi Cihazdır.

8.5g	12.5g	STERİL	R	CE 2292
GMDN Kodu	Ürün Tanımı	Markası		
37717	12.5g Akordiyon Şişe	Dispogel 12.5g		
37717	8.5g Akordiyon Şişe	Dispogel 8.5g		



**Dispogel 12.5g**  
(Erkekler için)



**Dispogel 8.5g**  
(Bayanlar için)